

Instrukcja używania

Materac Mały Książę

Dotyczy wersji/modeli: Kokos-pianka-gryka, Pianka-gryka

Opis wyrobu / mechanizm działania

Materac ortopedyczny dziecięcy wykonany z pianki poliuretanowej o dwustronnej powierzchni. Jedną z nich stanowi mata kokosowa łączona lateksem, a drugą stronę stanowi podkład z naturalnej łuski gryczanej stanowiącej jedyny naturalny podkład do spania. Zawarte w łusce taniny znacząco wpływają na zmniejszenie rozwoju roztoczy oraz bakterii w materacu oraz powierzchni skóry. Wykazuje dodatkowo dużą odporność na przenikanie mikroorganizmów. Zastosowanie łusek gryki i ich specjalne ułożenie powoduje łatwiejszą cyrkulację powietrza. Poprawia to właściwości wentylacyjne, a przez co zmniejsza się wilgotność ciała. Dopełnieniem właściwości materaca jest mata kokosowa która współgra z pozostałymi częściami omawianego wyrobu. Dzięki łączeniu włókien kokosa naturalnym lateksem materac odporny jest na jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe pod wpływem nacisku. Materac dostępny jest w następujących rozmiarach: 120x60cm, 140x70cm, 160x70cm, 160x80cm, 180x80cm, 200x90cm.

Przewidziane Zastosowanie / Wskazania:

Materac oprócz klasycznego zastosowania może również stanowić wyposażenie łóżek na szpitalnych oddziałach pediatrycznych. Dzięki zastosowanym materiałom oraz jakości wykonania spełnia on wymogi stawiane przed tego typu wyposażeniem. Wykorzystanie łusek gryki poprawia dopasowanie materaca do kształtu ciała pacjenta. Materace z tego materiału nie odkształcają się gdyż są odporne na zgniatanie oraz swobodnie przesypują się wewnątrz materaca. Zapewnia to profilaktykę powstawania odleżyn dodatkowo szczeliny znajdujące się między łuskami zapewniają swobodną cyrkulację powietrza. Kolejną właściwością tego naturalnego materiału jest to iż nie nagrzewa się przy kontakcie z ciałem dzięki czemu zmniejsza się potliwość ciała pacjenta, a materac nie pochłania nadmiernej ilości wilgoci. Pianka poliuretanowa jest materiałem stosowanym od dawna przy produkcji materacy zarówno tych do codziennego stosowania jak i tych na oddziałach szpitalnych. Odpowiednia sprężystość pianki poliuretanowej w materacu zapewnia podczas leżenia i zmiany pozycji równomierne rozłożenie ciężaru ciała oraz zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa. Mata kokosowa jest idealnym wykończeniem opisywanej pomocy pielęgnacyjnej. Jej cechy współgrają z omawianymi wcześniej właściwościami innych części materaca. Dodatkowo poprawia wytrzymałość i trwałość produktu. Przed wykorzystaniem materaca należy przeprowadzić wywiad i wykluczyć uczulenie na lateks który jest wykorzystywany do łączenia włókien maty kokosowej.

Przeciwwskazania:

Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania wyrobu.



Ostrzeżenia:

1. Nie należy używać wyrobu jeżeli uległ on uszkodzeniu lub zniekształceniu.
2. Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy wyrobu.
3. W przypadku wystąpienia alergicznej wysypki skórnej, należy natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.
4. Nie używaj dłużej niż 24 godziny w sposób ciągły

Przewidziany użytkownik

Wyrób medyczny przeznaczony jest dla laika (użytkownika nieprofesjonalnego).

Grupy docelowe pacjentów

Pacjenci ze wskazaniami do stosowania profilaktyki przeciwoleżynowej oraz mających wskazanie do zachowania naturalnej krzywizny kręgosłupa podczas snu.

Utylizacja wyrobu medycznego

Utylizację wyrobu należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

Sposób czyszczenia



Nie chlorować, nie prać chemicznie, nie wykręcać, nie odwirowywać. Nie prasować.

Skład

Bawełna, PU, PWC, PES, Włókna kokosowe, Łuska gryki



UWAGA

Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z wyrobem, należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i / lub pacjent ma siedzibę.

Objaśnienie zastosowanych symboli

	Producent		Chronić przed wilgocią
	Zgodność z Rozporządzeniem UE 2017/745		Chronić przed światłem słonecznym
	Numer serii/partii		Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Ostrzeżenie		Wyrób medyczny
	Zajrzyj do instrukcji używania		Zaleca się krótkie i dokładne pranie ręczne materiałów wyściółki w 30 ° C, nie używać wybielacza, nie prasować, nie czyścić chemicznie, nie używać odplamiaczy zawierających rozpuszczalnik, nie używać suszarki bębnowej



MATSEN DAMIAN BARGIEŁ
ul. Dworska 30
34-100 Tomice
www.matsen.pl
tel. 33 476 65 00
biuro@matsen.pl