

Instrukcja używania

Materac szpitalny z pokrowcem

Dotyczy wersji/modeli: Standard, Optimum, Comfort

Opis wyrobu / mechanizm działania

Materace szpitalne wykonane z pianki poliuretanowej o gęstości 25-30-35kg/m³. Wymiary materaca to 200cm długości, 80cm szerokości oraz 12cm grubości. Specjalne wzajemne prostopadłe wycięcia wkładu sprawiają że krążenie krwi jest niczym nie ograniczone. Dodatkowym atrybutem wyposażenia jest pokrowiec paroprzepuszczalny który zapewnia doskonałą wentylację i ochronę przed podrażnieniem skóry, poprawia to również właściwości wentylacyjne, a przez co zmniejsza się wilgotność ciała. Pokrowiec posiada również atesty na wodoszczelność.

Przewidziane Zastosowanie / Wskazania:

Materac może stanowić wyposażenie łóżka szpitalnego. Odpowiednia sprężystość pianki poliuretanowej w materacu zapewnia podczas leżenia i zmiany pozycji równomierne rozłożenie ciężaru ciała oraz zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa. Materac powinien być stosowany w przypadku hospitalizacji pacjentów również tych u których może dojść do powstawania odleżyn pierwszego stopnia Produkt zapewnia wygodny i zdrowy sen nie powodując dolegliwości odkręgosłupowych.

Przeciwwskazania:

Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania wyrobu.

Ostrzeżenia:

- 
1. Nie należy używać wyrobu jeżeli uległ on uszkodzeniu lub zniekształceniu.
 2. Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy wyrobu.
 3. W przypadku wystąpienia alergicznej wysypki skórnej, należy natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.
 4. Nie używaj dłużej niż 24 godziny w sposób ciągły

Przewidziany użytkownik

Wyrób medyczny przeznaczony jest dla laika (użytkownika nieprofesjonalnego).

Grupy docelowe pacjentów

Pacjenci ze wskazaniami do stosowania profilaktyki przeciwoleżynowej oraz mających wskazanie do zachowania naturalnej krzywizny kręgosłupa podczas snu.

Utylizacja wyrobu medycznego

Utylizację wyrobu należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

Sposób czyszczenia



Nie chlorować, nie prać chemicznie, nie wykręcać, nie odwirowywać. Nie prasować.

Skład

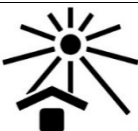
Bawełna, PU, PWC, PES



UWAGA

Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z wyrobem, należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i / lub pacjent ma siedzibę.

Objaśnienie zastosowanych symboli

	Producent		Chronić przed wilgocią
	Zgodność z Rozporządzeniem UE 2017/745		Chronić przed światłem słonecznym
	Numer serii/partii		Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Ostrzeżenie		Wyrób medyczny
	Zajrzyj do instrukcji używania		Zaleca się krótkie i dokładne pranie ręczne materiałowych elementów wyściółki w 30 ° C, nie używać wybielacza, nie prasować, nie czyścić chemicznie, nie używać odplamiaczy zawierających rozpuszczalnik, nie używać suszarki bębnowej



MATSEN DAMIAN BARGIEŁ

ul. Dworska 30

34-100 Tomice

www.matsen.pl

tel. 33 476 65 00

biuro@matsen.pl