



Instrukcja używania

Podkład na materac

Dotyczy modeli: Pinsonic PU, Ecocaress PU, Ecocomfortnight PU, Yumos PU, Easywipe PU, Pinsonic Plus, Ecocaress Plus

Opis wyrobu / mechanizm działania

Materac zmniejszający ryzyko rozwoju roztoczy i ich alergenów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów w tym: bawełny 80%, poliestru 20% oraz pokryciu w 100% z PWC, podkład zapewnia pełną ochronę przed wilgocią. To właśnie ten czynnik sprawia iż materace w łóżkach mogą stać się siedliskiem niebezpiecznych bakterii i drobnoustrojów. Podkład chroni materac przed wszelkimi zabrudzeniami. Ceratowa dolna warstwa poszycia nie przepuszcza płynów oraz wilgoci. Wierzchnia część została wykonana z miękkiej tkaniny frotte która dodatkowo chroni pacjentów przed odparzeniami. Pokład można prać w temperaturze do 95° C dzięki czemu produkt zachowuje swoją sterylną czystość. Wyrób produkowany jest w kolorze białym.

Przewidziane Zastosowanie / Wskazania:

Wyrób znajduje zastosowanie w opiece pielęgnacyjnej przy dzieciach oraz osobach starszych. Mogą z niego korzystać również pacjenci z astmą oskrzelową lub uczuleni na kurz. Produkt może być stosowany w sanatoriach, domach opieki i szpitalach jako codzienne wyposażenie łóżek.

Przeciwwskazania:

Nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania wyrobu.

Ostrzeżenia:

- 
1. Nie należy używać wyrobu, jeżeli uległ on uszkodzeniu lub zniekształceniu.
 2. Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy wyrobu.
 3. W przypadku wystąpienia alergicznej wysypki skórnej, należy natychmiast zaprzestać stosowania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.
 4. Nie używaj dłużej niż 24 godziny w sposób ciągły

Przewidziany użytkownik

Wyrób medyczny przeznaczony jest dla laika (użytkownika nieprofesjonalnego).

Grupy docelowe pacjentów

Pacjenci ze wskazaniami do stosowania profilaktyki przeciwoleżynowej oraz mających wskazanie do zachowania naturalnej krzywizny kręgosłupa podczas snu.

Utylizacja wyrobu medycznego

Utylizację wyrobu należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

Sposób czyszczenia



Nie chlorować, nie prać chemicznie, nie wykręcać, nie odwirowywać. Nie prasować.

Skład

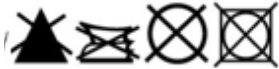
Bawełna, PU, PWC, PES



UWAGA

Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z wyrobem, należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i / lub pacjent ma siedzibę.

Objaśnienie zastosowanych symboli

	Producent		Chronić przed wilgocią
	Zgodność z Rozporządzeniem UE 2017/745		Chronić przed światłem słonecznym
	Numer serii/partii		Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Ostrzeżenie		Wyrób medyczny
	Zajrzyj do instrukcji używania		Nie używać wybielacza, nie prasować, nie czyścić chemicznie, nie używać odplamiaczy zawierających rozpuszczalnik, nie używać suszarki bębnowej



MATSEN DAMIAN BARGIEŁ

ul. Dworska 30

34-100 Tomice

www.matsen.pl

tel. 33 476 65 00

biuro@matsen.pl